

スロープのご紹介

スロープは、段差を解消することによって、主に車いすのご利用者および介助者の負担を軽減し、行動範囲を広げることができます。

傾斜角度と
スロープ選びのポイント

◎使用できる段差の目安

傾斜角
5°

自力走行

車いすで自走ができる傾斜角度です。
スロープの長さは、段差の高さの12倍が必要です。

傾斜角
10°

介助者付き添いでの走行

介助する方が楽に車いすを押せて、
体力のある方なら自走も可能な傾斜角度です。
スロープの長さは、段差の高さの6倍が必要です。

傾斜角
15°

急勾配

かなりの急勾配で、通常使用できる傾斜角度の限界です。
スロープの長さは、段差の高さの4倍が必要です。

設置時の
注意点

段差にあったスロープでも、長くなって道路にはみ出すと危険です。
設置の際には、スロープの長さ分のスペースおよび車いすの
回転スペースが十分あるかを確認してください。

◎傾斜角度の目安

※□部分は、傾斜角度が急勾配のため、使用できません。

段差高さ → 長さ	40cm	70cm	90cm	120cm	140cm	165cm	180cm	185cm	200cm	205cm	210cm	240cm	250cm	285cm	300cm
100cm														21°	19°
95cm														19°	18°
90cm														18°	17°
85cm												21°	20°	17°	16°
80cm												19°	19°	16°	15°
75cm									21°	21°	18°	17°	15°	14°	
70cm								20°	20°	19°	18°	16°	14°	13°	
65cm							21°	19°	19°	17°	18°	16°	15°	13°	12°
60cm						21°	19°	19°	17°	17°	14°	14°	12°	10°	
55cm						19°	18°	17°	16°	16°	15°	13°	13°	11°	9°
50cm					21°	18°	16°	16°	14°	14°	14°	12°	12°	10°	8°
45cm				22°	19°	16°	14°	14°	13°	13°	12°	11°	10°	9°	7°
40cm			19°	17°	14°	13°	12°	12°	11°	11°	10°	9°	8°	6°	
35cm			23°	17°	14°	12°	11°	11°	10°	10°	10°	8°	8°	7°	5°
30cm			19°	14°	12°	10°	10°	9°	9°	8°	8°	7°	7°	6°	
25cm		21°	16°	12°	10°	9°	8°	8°	7°	7°	7°	6°	6°	5°	
20cm		17°	13°	10°	8°	7°	6°	6°	6°	6°	5°	5°	5°		
15cm	22°	12°	10°	7°	6°	5°	5°	5°	4°	4°					
10cm	14°	8°	6°	5°	4°										
5cm	7°	4°	3°												

スロープ.1

小さな段差による歩行時の
つまずきの防止や、
車いす走行時の負担を軽減
するための低段差スロープ。

インタースロープ

TAIS-00054-000173 1008-0039:MSRP1076 (高さ1cm)
TAIS-00054-000174 1008-0040:MSRP1576 (高さ1.5cm)
TAIS-00054-000175 1008-0041:MSRP2076 (高さ2cm)
TAIS-00054-000176 1008-0042:MSRP2576 (高さ2.5cm)
TAIS-00054-000177 1008-0043:MSRP3076 (高さ3cm)
TAIS-00054-000178 1008-0044:MSRP3576 (高さ3.5cm)
TAIS-00054-000179 1008-0045:MSRP4076 (高さ4cm)
TAIS-00054-000180 1008-0046:MSRP4576 (高さ4.5cm)
TAIS-00054-000181 1008-0047:MSRP5076 (高さ5cm)
TAIS-00054-000182 1008-0072:MSRP5576 (高さ5.5cm)
TAIS-00054-000183 1008-0073:MSRP6076 (高さ6cm)
TAIS-00054-000184 1008-0070:MSRP6576 (高さ6.5cm)
[モルテン]

◎設置例




玄関(あがりかまち)の段差



和室の段差



敷居の段差

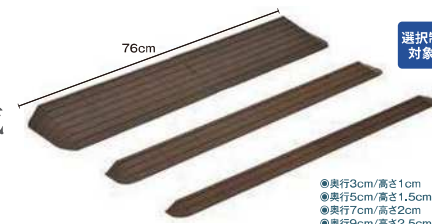選択制
対象

◎奥行3cm/高さ1cm
◎奥行5cm/高さ1.5cm
◎奥行7cm/高さ2cm
◎奥行9cm/高さ2.5cm
◎奥行11cm/高さ3cm
◎奥行13cm/高さ3.5cm
◎奥行15cm/高さ4cm
◎奥行17cm/高さ4.5cm
◎奥行19cm/高さ5cm
月額希望レンタル料 550円

ご利用者負担額
(1割) 55円
(2割) 110円
(3割) 165円

◎奥行21cm/高さ5.5cm
◎奥行23cm/高さ6cm
◎奥行25cm/高さ6.5cm
月額希望レンタル料 990円
ご利用者負担額
(1割) 99円
(2割) 198円
(3割) 297円

狭いスペースでも設置可能、
無段階の長さ調整。

スライドスロープ

TAIS-00465-000089
1008-0037:ESK200R
[イーストアイ]



月額希望レンタル料 4,400円

ご利用者負担額


(1割) 440円
(2割) 880円
(3割) 1,320円

重量
約6kg耐荷重
300kg

独自構造により、
巻き取ることが可能。

車いす用スロープ
段ない・ス ロールタイプ

TAIS-01235-000036
1008-0029:G30150
[シコク]

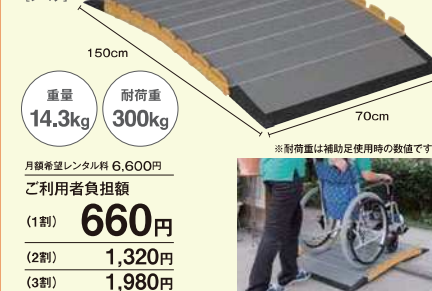重量
14.3kg耐荷重
300kg

月額希望レンタル料 6,600円

ご利用者負担額

(1割) 660円
(2割) 1,320円
(3割) 1,980円

※耐荷重は補助足使用時の数値です。



スロープ.2

狭い間口にも設置可能!車いすの乗り入れ性も◎。

ケアスローブ®

TAIS:00093-000015 1008-0054:CS-65 (65cm)
TAIS:00093-000016 1008-0048:CS-100 (100cm)
TAIS:00093-000017 1008-0036:CS-120 (120cm)
TAIS:00093-000018 1008-0049:CS-150 (150cm)
TAIS:00093-000019 1008-0050:CS-175 (175cm)
TAIS:00093-000020 1008-0051:CS-200 (200cm)
TAIS:00093-000021 1008-0052:CS-240C (240cm)
TAIS:00093-000038 1008-0053:CS-285C (285cm)

【ケアメディックス】



● 設置例



玄関

●65cm ●重量:3kg
月額希望レンタル料 3,850円

ご利用者負担額

(1割)	385円
(2割)	770円
(3割)	1,155円

●100cm ●重量:5kg
月額希望レンタル料 4,400円

ご利用者負担額

(1割)	440円
(2割)	880円
(3割)	1,320円



階段のある玄関

●120cm ●重量:6kg
月額希望レンタル料 6,140円

ご利用者負担額

(1割)	614円
(2割)	1,228円
(3割)	1,842円

●150cm ●重量:8kg
月額希望レンタル料 6,500円

ご利用者負担額

(1割)	650円
(2割)	1,300円
(3割)	1,950円



緑側

●175cm ●重量:9kg
月額希望レンタル料 6,600円

ご利用者負担額

(1割)	660円
(2割)	1,320円
(3割)	1,980円

●200cm ●重量:10kg
月額希望レンタル料 7,700円

ご利用者負担額

(1割)	770円
(2割)	1,540円
(3割)	2,310円

●240cm ●重量:12kg
月額希望レンタル料 8,800円

ご利用者負担額

(1割)	880円
(2割)	1,760円
(3割)	2,640円

●285cm ●重量:15kg
月額希望レンタル料 9,900円

ご利用者負担額

(1割)	990円
(2割)	1,980円
(3割)	2,970円

スロープ
SLOPE DEVICE

ケアスロープ2台、ジョイント台1台を
組み合わせた車いす用の長尺スロープ。

ケアスロープJ

TAS-00093-000022	1009-0065C-3A40 (CS-J340)	TAS-00093-000047	1009-0066C-3A460 (CS-J460)
TAS-00093-000023	1009-0065C-3A325 (CS-J325)	TAS-00093-000048	1009-0060C-3A440 (CS-J440)
TAS-00093-000024	1009-0065C-3A350 (CS-J350)	TAS-00093-000049	1009-0063C-3A440 (CS-J440)
TAS-00093-000025	1009-0061C-3A490 (CS-J490)	TAS-00093-000050	1009-0067C-3A485 (CS-J485)
TAS-00093-000043	1009-0065C-3A435 (CS-J435)	TAS-00093-000051	1009-0064C-3A485 (CS-J485)
TAS-00093-000044	1009-0067C-3A350 (CS-J350) <3A350W>	TAS-00093-000052	1009-0068C-3A425 (CS-J425)
TAS-00093-000045	1009-0069C-3A375 (CS-J375)	TAS-00093-000053	1009-0069C-3A570 (CS-J570)
TAS-00093-000046	1009-0062C-3A415 (CS-J415)		

[キヤメックス]

使用方法を
動画で
チェック!



耐荷重
300kg

●ケアスロープJ
早見表

早見表		CS-150		CS-175		CS-200		CS-240C		CS-285C	
CS-150	※CS-J-300 月間希望レンタル料 15,300円	CS-175	※CS-J-325 月間希望レンタル料 15,300円	CS-200	※CS-J-375 月間希望レンタル料 16,400円	CS-240C	※CS-J-435 月間希望レンタル料 18,600円	CS-285C	※CS-J-435 月間希望レンタル料 18,600円	CS-320C	※CS-J-570 月間希望レンタル料 21,900円
	ご利用者 負担額 (1名)		ご利用者 負担額 (1名)		ご利用者 負担額 (1名)		ご利用者 負担額 (1名)		ご利用者 負担額 (1名)		ご利用者 負担額 (1名)
	(2名) 3,060円 (3名) 4,590円		(2名) 3,060円 (3名) 4,590円		(2名) 3,280円 (3名) 4,920円		(2名) 3,500円 (3名) 5,250円		(2名) 3,720円 (3名) 5,580円		(2名) 4,380円 (3名) 6,570円
CS-175	※CS-J-350 月間希望レンタル料 16,400円	CS-200	※CS-J-375 月間希望レンタル料 16,400円	CS-240C	※CS-J-400 月間希望レンタル料 17,500円	CS-285C	※CS-J-440 月間希望レンタル料 18,600円	CS-320C	※CS-J-480 月間希望レンタル料 19,700円	CS-360C	※CS-J-510 月間希望レンタル料 20,800円
	ご利用者 負担額 (1名)		ご利用者 負担額 (1名)		ご利用者 負担額 (1名)		ご利用者 負担額 (1名)		ご利用者 負担額 (1名)		ご利用者 負担額 (1名)
	(2名) 3,280円 (3名) 4,920円		(2名) 3,500円 (3名) 5,250円		(2名) 3,720円 (3名) 5,580円		(2名) 3,940円 (3名) 5,910円		(2名) 4,160円 (3名) 6,240円		(2名) 4,380円 (3名) 6,570円
CS-200	※CS-J-380 月間希望レンタル料 17,500円	CS-240C	※CS-J-400 月間希望レンタル料 17,500円	CS-285C	※CS-J-440 月間希望レンタル料 18,600円	CS-320C	※CS-J-480 月間希望レンタル料 19,700円	CS-360C	※CS-J-510 月間希望レンタル料 20,800円	CS-400C	※CS-J-540 月間希望レンタル料 21,900円
	ご利用者 負担額 (1名)		ご利用者 負担額 (1名)		ご利用者 負担額 (1名)		ご利用者 負担額 (1名)		ご利用者 負担額 (1名)		ご利用者 負担額 (1名)
	(2名) 3,500円 (3名) 5,250円		(2名) 3,720円 (3名) 5,580円		(2名) 3,940円 (3名) 5,910円		(2名) 4,160円 (3名) 6,240円		(2名) 4,380円 (3名) 6,570円		(2名) 4,600円 (3名) 6,900円
CS-240C	※CS-J-415 月間希望レンタル料 18,600円	CS-285C	※CS-J-435 月間希望レンタル料 18,600円	CS-320C	※CS-J-460 月間希望レンタル料 19,700円	CS-360C	※CS-J-490 月間希望レンタル料 20,800円	CS-400C	※CS-J-520 月間希望レンタル料 21,900円	CS-440C	※CS-J-550 月間希望レンタル料 23,000円
	ご利用者 負担額 (1名)		ご利用者 負担額 (1名)		ご利用者 負担額 (1名)		ご利用者 負担額 (1名)		ご利用者 負担額 (1名)		ご利用者 負担額 (1名)
	(2名) 3,720円 (3名) 5,580円		(2名) 3,940円 (3名) 5,910円		(2名) 4,160円 (3名) 6,240円		(2名) 4,380円 (3名) 6,570円		(2名) 4,600円 (3名) 6,900円		(2名) 4,820円 (3名) 7,230円




勾配のある場所でも安定設置できる
車いす用傾斜対応スロープ。

ケアスロープT

TAIS:00093-000059 1008-0074:CST-150 (CS-150用) TAIS:00093-000062 1008-0077:CST-240 (CS-240C用)
TAIS:00093-000060 1008-0075:CST-175 (CS-175用) TAIS:00093-000063 1008-0078:CST-285 (CS-285C用)
TAIS:00093-000061 1008-0076:CST-200 (CS-200用) **【ケアメディックス】**

耐荷重
300k

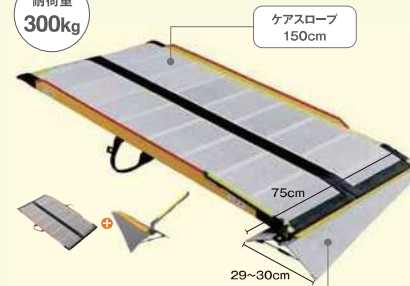


- 重量:3kg
- 高さ調整範囲:4~6cm
- 対応傾斜:3~5°

ケアスロープT
専用傾斜補正台

ケアスロ－

地面の隙間に敷き、脱輪防止アームを付け替える事で

右どちらでも設置可能

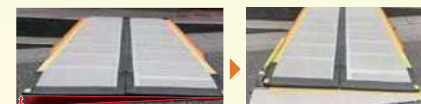

勾配のある場所に入ロープを置
隠間が発生、設置が不安定...



ケアスロープと地面の隙間に敷き、脱輪防止アームをセットするだけの簡単設置！
脱輪防止アームを付け替える事で左右どちらでも設置可能